



Symptomatická léčba onemocnění konečníku

Inovativní zdravotnický prostředek využívá vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a mikronizovaného metalického stříbra (MMS) k léčbě příznaků u hemeroidů, análních fisur a jiných zánětů sliznice a kůže v oblasti konečníku.

KOMBINACE HA + MMS

- ✓ Urychluje hojení i u defektů dlouhodobě nereagujících na léčbu
- ✓ Poskytuje baktericidní a anti-fungální ochranu i proti lékově rezistentním mikrobům
- ✓ Podporuje hydrataci sliznice

Přínosy MMS:

- ✓ Brání růstu a množení bakterií a hub
- ✓ Obnovuje homeostázu slizniční mikroflóry
- ✓ Antiseptický / desinfekční efekt
- ✓ Poskytuje neviditelnou ochranu

Přínosy HA:

- ✓ Má protizánětlivé účinky
- ✓ Výborná biokompatibilita
- ✓ Snižuje tvorbu jizevnaté tkáně
- ✓ Hydratuje tkáň, tím podporuje hojení sliznic a kůže

NOVINKA



Infolinka: +420 734 753 440

Výrobce:
Pro MDT Intn'l SA (Švýcarsko) vyrobila
ZETA FARMACEUTICI S.p.A.
via Mentana, 38
36100 Vicenza, Itálie

Distributor:
Novière s.r.o.
Nuselská 499/132
140 00 Praha 4
Česká republika

Novière

www.gaf-gel.cz



Jak používat anální gel GAF™?

Aplikujte GAF™ prvních 14 dní ráno a večer, ideálně po každém vyprázdnění. 1 x denně další dva týdny nebo do vymizení příznaků.

- ✓ Velmi tenká vrstva gelu GAF™ má být nanesena na postiženou oblast po jejím předchozím omytí - do nitra konečníku nebo zevně na jeho okolí
- ✓ Umyjte si ruce a nasadte na ukazovák gumovou špičku nebo gumové rukavice (plastikový sáček)
- ✓ Vytlačte tenkou vrstvu gelu z tuby podél posledního článku prstu a aplikujte.

Při léčbě GAF™ je rovněž možné užívat produkty působící na jiném mechanismu účinku využívající jiný terapeutický princip (přípravky změkčující stolici, posilující lokální krevní srážlivost, adstringentní látky apod.).
O případných nežádoucích účincích se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Pozorně čtěte příbalový leták.

GAF™ anální gel 15 ml v tubě

Složení:

HA - Hyaluronát sodný (velikost molekuly 1,5 MDa)

MMS - Mikronizované metalické stříbro (koloidní forma)

Pomocné látky: purifikovaná voda, sorbitol, dexpanthenol, glycerol, hydroxyethylcelulóza, benzyl alkohol, fenoxyetanol, hydroxid sodný, karbomer, polykarbofil.



Infolinka: +420 734 753 440

Novière

www.gaf-gel.cz

Švýcarská společnost Novière, přivádějící na trh unikátní inovativní produkty s kyselinou hyaluronovou pro nejmodernější terapii v oblasti pohybového aparátu a trávicího systému.

